

Medizinisches Gleitmittel für den Intimbereich

**FAIR
SQUARED**

Das wasserlösliche Sensitive Lubricant bietet eine zusätzliche Befeuchtung für mehr Wohlbefinden während des Geschlechtsverkehrs und zur Behandlung von Scheidentrockenheit. Es erleichtert das Eindringen vaginal oder rektal. Es kann ebenso zur Körpermassage oder mit Spielzeugen verwendet werden. Es kann mit Kondomen verwendet werden. Es ist geruchslos, fettfrei, vegan und nicht steril. Es ist speziell für den Genitalbereich entwickelt worden und reizt nicht die empfindliche Haut. Dieses Produkt ist kein Verhütungsmittel und enthält keine spermiziden Wirkstoffe.



- VERBINDET SICH MIT KÖRPEREIGENER FEUCHTIGKEIT ZU EINEM NATÜRLICHEN, HOCHEFFEKTIVEN GLEIT- UND MASSAGEGEL
- VERBESSERT DIE GLEITFÄHIGKEIT BEIM INTIMVERKEHR
- BEUGT SCHMERZEN BEIM GESCHLECHTSVERKEHR VOR
- AUF WASSERBASIS HERGESTELLT. WASSERLÖSLICH UND FETTFREI
- FARB- UND GERUCHLOS, GESCHMACKSNEUTRAL
- DERMATOLOGISCH UND MIKROBIOLOGISCH GETESTET. PH-WERT 5.0 BIS 6.5
- KLEBT NICHT
- FÜR DIE BENUTZUNG MIT KONDOMEN UND SEXTOYS GEEIGNET
- VEGANE FORMULIERUNG
- LEICHTE HANDHABUNG MIT EINER HAND
- OSMOLALITÄT 1800-2500 MOSM/KG
- VISKOSITÄT 10.000-17.000 CPS



ANWENDUNG:

Öffnen Sie die Kappe an der Unterseite der Tube, entfernen Sie die Folienversiegelung und drücken Sie die Tube zusammen, um das Gleitmittel auf die Finger zu verteilen und direkt auf Kondome, die Haut oder andere gewünschte Stellen aufzutragen. FAIR SQUARED Lubricant ist sicher in der Anwendung mit Kondomen aus Naturkautschuklatex und Polyisopren.

WICHTIG:

Lesen Sie vor der Anwendung die Anweisungen und Inhaltsstoffe auf dieser Tube. • FAIR SQUARED Lubricant ist ein Medizinprodukt, das nur von Erwachsenen verwendet werden darf. Es ist nicht steril, nicht reizend, fettfrei und ist wasserlöslich. Es hilft, die Reibung zu reduzieren, die mit dünnem und/oder trockenem Genitalgewebe beim Geschlechtsverkehr verbunden ist. Der Benutzer kann FAIR SQUARED Lubricant bei Bedarf erneut auftragen. Jede Anwendung ist jedoch für den einmaligen Gebrauch bestimmt. • FAIR SQUARED Lubricant ist kein Verhütungsmittel und enthält keine spermiziden Inhaltsstoffe. Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen und Ohren. Es ist nicht zum Verzehr geeignet. Bei Reizungen die Anwendung sofort abbrechen und mit sauberem Wasser abwaschen. Bei anhaltender Reizung bitte einen Arzt aufsuchen. Bitte alle schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit diesem Produkt dem Hersteller und der zuständigen Behörde melden. • FAIR SQUARED Lubricant nach dem Öffnen innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen. Bitte außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bitte die leere Packung im Hausmüll in einem geschlossenen Mülleimer entsorgen. Chargennummer und Verfallsdatum siehe Tubenoberseite.

PRODUKTNAME	ART.-NR.	VE	EAN CODE
FAIR SQUARED SENSITIVE LUBE 200 ML	4719651	6	4260365853338
FAIR SQUARED SENSITIVE LUBE SACHET 50 x 5 ML	4719652	6	4260365853345

INGREDIENTS:

AQUA, GLYCERINE, PROPYLENE GLYCOL, HYDROXYETHYL CELULOSE, CAPRYLOYL/CAPROYL ANHYDRO METHYL GLUCAMIDE, PHENOXYETHANOL, ETHYL-HEXYLGLYCERIN, POLYSORBATE 20, SODIUM BENZOATE, DISODIUM EDTA, LACTIC ACID

FAIR SQUARED GmbH

Hermann-Heinrich-Gossen-Straße 4
D-50858 Köln (Cologne), Germany
Telefon +49 (0) 2234 9296600
info@fairsquared.com
www.fairsquared.com