

# AMARELLE GLEITMITTEL LUBE STRAWBERRY (RED RIBBON)

Gefühlsechtes und langanhaltendes wasserlösliches medizinisches Gleitmittel zur besseren Lubrifikation. Das wasserlösliche Sensitive Lubricant bietet eine zusätzliche Befeuchtung für mehr Wohlbefinden während des Geschlechtsverkehrs und zur Behandlung von Scheidentrockenheit. Es erleichtert das Eindringen vaginal oder rektal. Es kann mit Kondomen verwendet werden. Es ist fettfrei, vegan und nicht steril. Es ist speziell für den Genitalbereich entwickelt worden und reizt nicht die empfindliche Haut. Dieses Produkt ist kein Verhütungsmittel und enthält keine spermiziden Wirkstoffe.



- TEILERLÖSE DURCH DEN EINKAUF DIESES PRODUKTES GEHEN ZUGUNSTEN DER DEUTSCHEN AIDS HILFEN ([WWW.AIDSHILFEN.DE](http://WWW.AIDSHILFEN.DE)) UND DER HOPE STIFTUNG ([WWW.HOPECAPETOWN.COM](http://WWW.HOPECAPETOWN.COM))
- AMARELLE LUBE STRAWBERRY KLEBT NICHT & IST FETTFREI
- AMARELLE LUBE STRAWBERRY IST HAUTFREUNDLICH, DERMATOLOGISCH GETESTET UND HAT EINEN PH WERT VON 5.0 BIS 6.5.
- AMARELLE LUBE STRAWBERRY IST FREI VON TIERISCHEN INHALTSSTOFFEN (VEGAN).
- AMARELLE LUBE STRAWBERRY IST AUCH FÜR DIE BENUTZUNG MIT SPIELZEUGEN UND ZUR MASSAGE GEEIGNET.
- AMARELLE LUBE STRAWBERRY ERMÖGLICHT EINE LEICHTE HANDHABUNG MIT EINER HAND
- AMARELLE LUBE STRAWBERRY HAT EINE OSMOLALITÄT VON 2000 – 3100 MOSM/KG & EINE VISKOSITÄT VON > 30,000 CPS
- MIT ERDBEERDUFT
- SPRACHEN AUF DER VERPACKUNG: DE/EN/FR

## ANWENDUNG:

Öffnen Sie die Kappe an der Unterseite der Tube, entfernen Sie die Folienversiegelung und drücken Sie die Tube zusammen, um das Gleitmittel auf die Finger zu verteilen und direkt auf Kondome, die Haut oder andere gewünschte Stellen aufzutragen. AMARELLE Lube Strawberry ist sicher in der Anwendung mit Kondomen aus Naturkautschuklatex und Polyisopren.

## WICHTIG:

Lesen Sie vor der Anwendung die Anweisungen und Inhaltsstoffe auf dieser Tube. • AMARELLE Lube Strawberry ist ein Medizinprodukt, das nur von Erwachsenen verwendet werden darf. Es ist steril, nicht reizend, fettfrei und ist wasserlöslich. Es hilft, die Reibung zu reduzieren, die mit dünnem und/oder trockenem Genitalgewebe beim Geschlechtsverkehr verbunden ist. Der Benutzer kann AMARELLE Lube Strawberry bei Bedarf erneut auftragen. Jede Anwendung ist jedoch für den einmaligen Gebrauch bestimmt. • AMARELLE Lube Strawberry ist kein Verhütungsmittel und enthält keine spermiziden Inhaltsstoffe. Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen und Ohren. Es ist nicht zum Verzehr geeignet. Bei Reizungen die Anwendung sofort abbrechen und mit sauberem Wasser abwaschen. Bei anhaltender Reizung bitte einen Arzt aufsuchen. Bitte alle schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit diesem Produkt dem Hersteller und der zuständigen Behörde melden. • AMARELLE Lube Strawberry nach dem Öffnen innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen. Bitte außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bitte die leere Packung im Hausmüll in einem geschlossenen Mülleimer entsorgen. Chargennummer und Verfallsdatum siehe Tubenoberseite.

| PRODUKTNAME                                             | ART.-NR. | VE | EAN CODE      |
|---------------------------------------------------------|----------|----|---------------|
| AMARELLE GLEITMITTEL LUBE STRAWBERRY (RED RIBBON) 200ML | 4719984  | 6  | 4260231450296 |

## INGREDIENTS:

AQUA, GLYCERINE, PROPYLENE GLYCOL, HYDROXYETHYL CELLULOSE, CAPRYLOYL/CAPROYL ANHYDRO METHYL GLUCAMIDE, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, POLYSORBATE 20, SODIUM BENZOATE, DISODIUM EDTA, LACTIC ACID, STRAWBERRY FLAVOUR



ECOaction GmbH  
Hermann-Heinrich-Gossen-Straße 4  
D-50858 Köln (Cologne), Germany  
Telefon +49 (0) 2234 929 66 00  
[info@ecoaction.de](mailto:info@ecoaction.de)  
[www.ecoaction.eu](http://www.ecoaction.eu)