

AMARELLE GLEITMITTEL LUBE SOFT (RED RIBBON)

Gefühlsechtes und langanhaltendes wasserlösliches medizinisches Gleitmittel zur besseren Lubrifikation. Das wasserlösliche Sensitive Lubricant bietet eine zusätzliche Befeuchtung für mehr Wohlbefinden während des Geschlechtsverkehrs und zur Behandlung von Scheidentrockenheit. Es erleichtert das Eindringen vaginal oder rektal. Es kann mit Kondomen verwendet werden. Es ist geruchslos, fettfrei, vegan und nicht steril. Es ist speziell für den Genitalbereich entwickelt worden und reizt nicht die empfindliche Haut. Dieses Produkt ist kein Verhütungsmittel und enthält keine spermiziden Wirkstoffe.



- TEILERLÖSE DURCH DEN EINKAUF DIESES PRODUKTES GEHEN ZUGUNSTEN DER DEUTSCHEN AIDS HILFEN (WWW.AIDSHILFEN.DE) UND DER HOPE STIFTUNG (WWW.HOPECAPETOWN.COM)
- AMARELLE LUBE SOFT KLEBT NICHT & IST FETTFREI
- AMARELLE LUBE SOFT IST HAUTFREUNDLICH, DERMATOLOGISCH GETESTET UND HAT EINEN PH WERT VON 5.0 BIS 6.5.
- AMARELLE LUBE SOFT IST FREI VON TIERISCHEN INHALTSSTOFFEN (VEGAN). DIESES PRODUKT IST OHNE DUFT- UND FARBSTOFFE HERGESTELLT.
- AMARELLE LUBE SOFT IST AUCH FÜR DIE BENUTZUNG MIT SPIELZEUGEN UND ZUR MASSAGE GEEIGNET.
- AMARELLE LUBE SOFT ERMÖGLICHT EINE LEICHTE HANDHABUNG MIT EINER HAND
- AMARELLE LUBE SOFT HAT EINE OSMOLALITÄT VON 1800-2500 MOSM/KG & EINE VISKOSITÄT VON 10.000-17.000 CPS
- SPRACHEN AUF DER VERPACKUNG: DE/EN/FR

ANWENDUNG:

Öffnen Sie die Kappe an der Unterseite der Tube, entfernen Sie die Folienversiegelung und drücken Sie die Tube zusammen, um das Gleitmittel auf die Finger zu verteilen und direkt auf Kondome, die Haut oder andere gewünschte Stellen aufzutragen. AMARELLE Lube Soft ist sicher in der Anwendung mit Kondomen aus Naturkautschuklatex und Polyisopren.

WICHTIG:

Lesen Sie vor der Anwendung die Anweisungen und Inhaltsstoffe auf dieser Tube. • AMARELLE Lube Soft ist ein Medizinprodukt, das nur von Erwachsenen verwendet werden darf. Es ist steril, nicht reizend, fettfrei und ist wasserlöslich. Es hilft, die Reibung zu reduzieren, die mit dünnem und/oder trockenem Genitalgewebe beim Geschlechtsverkehr verbunden ist. Der Benutzer kann AMARELLE Lube Soft bei Bedarf erneut auftragen. Jede Anwendung ist jedoch für den einmaligen Gebrauch bestimmt. • AMARELLE Lube Soft ist kein Verhütungsmittel und enthält keine spermiziden Inhaltsstoffe. Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen und Ohren. Es ist nicht zum Verzehr geeignet. Bei Reizungen die Anwendung sofort abbrechen und mit sauberem Wasser abwaschen. Bei anhaltender Reizung bitte einen Arzt aufsuchen. Bitte alle schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit diesem Produkt dem Hersteller und der zuständigen Behörde melden. • AMARELLE Lube Soft nach dem Öffnen innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen. Bitte außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bitte die leere Packung im Hausmüll in einem geschlossenen Mülleimer entsorgen. Chargennummer und Verfallsdatum siehe Tubenoberseite.

PRODUKTNAME	ART.-NR.	VE	EAN CODE
AMARELLE GLEITMITTEL LUBE SOFT (RED RIBBON) 200ML	4719988	6	4260231450180

INGREDIENTS:

AQUA, GLYCERINE, PROPYLENE GLYCOL, HYDROXYETHYL CELULOSE, CAPRYLOYL/CAPROYL ANHYDRO METHYL GLUCAMIDE, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, POLYSORBATE 20, SODIUM BENZOATE, DISODIUM EDTA, LACTIC ACID



ECOaction GmbH
Hermann-Heinrich-Gossen-Straße 4
D-50858 Köln (Cologne), Germany
Telefon +49 (0) 2234 929 66 00
info@ecoaction.de
www.ecoaction.eu